

Catálogo de Productos



Hollister

¡Atención a los detalles. Atención a la vida!

Ostomía

New Image Sistema de Dos Piezas

Guías de Referencia para Selección de Producto.....	8
Barreras Cutáneas Planas con Aro Flotante.....	10
Barreras Cutáneas Convexas con Aro Flotante.....	11
Bolsas Drenables.....	12
Bolsas Cerradas.....	14
Bolsas para Urostomía.....	14

Sistema de Una Pieza para Ostomía

Premier Sistema de Una Pieza.....	18
Bolsas para Urostomía.....	20

Pouchkins Sistema Pediátrico

Pouchkins Sistema Pediátrico de Una Pieza.....	24
Pouchkins Sistema Pediátrico de Dos Piezas.....	25

Adapt Accesorios

Adapt Anillos Convexos.....	28
Adapt Anillos Planos.....	28
Adapt Tiras Moldeables.....	28
Adapt Pasta.....	28
Adapt Polvo.....	28
Pasta Karaya.....	29
Polvo Karaya.....	29
Gel Protector Cutáneo.....	29
Removedor de Adhesivo.....	29
Filtros Reemplazables.....	29
Adapt Lubricante y Desodorante.....	30
Tubo Adaptador para Bolsas de Urostomía.....	30
Pinzas para Bolsas Drenables.....	30
Cinturones para Ostomía.....	30
Barreras Cutáneas.....	31
Cubre Estomas.....	31

Tandem Barreras Convexas y Bolsas

Guías de Referencia para Selección de Producto.....	32
Barreras Cutáneas Planas con Aro Flotante.....	34
Barreras Cutáneas Convexas con Aro Flotante.....	35
Bolsas Drenables.....	36
Bolsas Cerradas.....	37
Bolsas para Urostomía.....	37

Bolsas de Una Pieza

Bolsas Drenables con Barrera Cutánea Plana.....	40
Bolsas Drenables Karaya 5.....	41
Bolsas Drenables con Barrera Cutánea Convexa.....	41
Bolsas Cerradas.....	42
Bolsas para Urostomía con Barrera Cutánea Plana.....	43
Bolsas para Urostomía con Barrera Cutánea Convexa.....	43

Irrigación

Sistema de Irrigación Completo.....	46
-------------------------------------	----

Cuidado de Heridas

Restore Plus Apósito Hidrocoloide: Estéril	50
Restore Extra Delgado Apósito Hidrocoloide: Estéril.....	50
Restore Cx Apósito Hidrocoloide: Estéril.....	51
Restore Apósito Hidrocoloide: Estéril.....	51
Restore CalciCare Apósito de Alginato de Calcio: Estéril.....	51
Restore Hidrogel.....	52

Dispositivos de Fijación

Anchor Fast Sujetador de Tubo Endotraqueal.....	58
Sujetador de Tubos de Drenaje (DTAD):Estéril.....	58
Sujetador de Tubo Horizontal (HTAD):Estéril.....	58
Sujetador de Tubo de Succión (STAD):Estéril.....	59
Sujetador de Tubos de Alimentación (FTAD):Estéril.....	59

Incontinencia

Incontinencia Urinaria Masculina

In View Catéteres Externos Masculinos Autoadheribles.....	62
Tubo Extensor Conector.....	62
Bolsa para Pierna Recolectora de Orina.....	62
Sujetador sin Latéx para Bolsa de Pierna.....	62
Bolsa Nocturna para Recolección de Orina con Válvula Anti-Reflujo.....	63

Incontinencia Fecal

Colectores Fecales.....	64
-------------------------	----

Códigos.....	68
---------------------	-----------

Glosario.....	72
----------------------	-----------

Centros de Venta y Centros de Asesoría.....	76
--	-----------

Ostomía

New Image Sistema de Dos Piezas

MEDIDA DEL ARO DE ENSAMBLE

44mm	57mm	70mm	102mm
------	------	------	-------

BARRERAS PLANAS CON ARO FLOTANTE

BARRERA FLEXTEND	RECORTABLE	CON MARCO ADHESIVO
		SIN MARCO ADHESIVO
BARRERA SOFTFLEX	RECORTABLE	SIN MARCO ADHESIVO

14602 Recortable hasta 32mm	14603 Recortable hasta 44mm	14604 Recortable hasta 57mm	14606 Recortable hasta 89mm
15602 Recortable hasta 32mm	15603 Recortable hasta 44mm	15604 Recortable hasta 57mm	-----
15002 Recortable hasta 32mm	-----	15004 Recortable hasta 57mm	-----

BARRERAS CONVEXAS CON ARO FLOTANTE

BARRERA FLEXTEND	RECORTABLE	CON MARCO ADHESIVO
	PRE-CORTADA	CON MARCO ADHESIVO

14802 Recortable hasta 32mm	14803 Recortable hasta 44mm	14804 Recortable hasta 57mm	-----
14901 - 16mm	14905 - 29mm	14909 - 41mm	-----
14902 - 19mm	14906 - 32mm	14910 - 44mm	-----
14903 - 22mm	14907 - 35mm	14911 - 51mm	-----
14904 - 25mm	14908 - 38mm	-----	-----

BOLSAS DRENABLES

CON FILTRO INTEGRADO AF300	CON CIERRE LOCK'N ROLL	TRANSPARENTE
		BEIGE
SIN FILTRO	CON CIERRE LOCK'N ROLL	TRANSPARENTE
		ULTRA TRANSPARENTE
		BEIGE
SIN FILTRO	CON PINZA	TRANSPARENTE

18192	18193	18194	-----
18182	18183	18184	-----
18132	18133	18134	-----
-----	-----	-----	18006
18112	18113	18114	-----
18102	18103	18104	-----

BOLSAS CERRADAS

CON FILTRO INTEGRADO AF300	BEIGE
-----------------------------------	-------

18372	18373	18374	-----
--------------	--------------	--------------	-------

BOLSAS PARA UROSTOMIA

ULTRA TRANSPARENTE
TRANSPARENTE

18422	18423	-----	-----
18402	-----	18404	-----

New Image

Sistema de Dos Piezas para Ostomía

Seguridad, flexibilidad, discreción y confort en un único producto



Barreras Cutáneas

Amplia variedad de opciones con características que satisfacen las necesidades individuales de cada persona ostomizada

Aro Flotante Hollister

Indicado para evitar presionar la región abdominal al ensamblar la barrera con la bolsa, brinda confort y seguridad.

Es de bajo perfil y altamente flexible, posee un sistema de ensamble que permite unir la bolsa y la barrera con una ligera presión entre ellos. Basta escuchar un "click" para que la barrera y la bolsa tengan un ensamble seguro.




Barrera cutánea **Flexrend** altamente absorbente, flexible y durable. Disponible en barreras planas y convexas, recortables y pre-cortadas.

Seguridad Adicional

Barreras con hidrocolooides y el exclusivo adhesivo hollister: son altamente flexibles y permiten la transpiración. Se amoldan al contorno de la piel, garantizando movilidad, elasticidad y confort.

Convexidad a la medida

Convexidad moderada (que es la más aceptada por la mayoría de los ostomizados) para un manejo perfecto en el 90% de las situaciones clínicas que requieren el uso de barreras convexas.

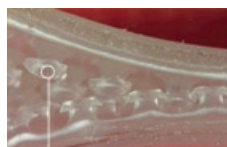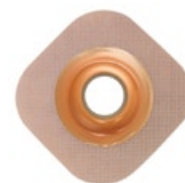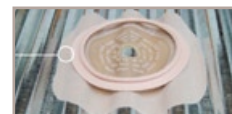

Bolsas

Exclusivo sistema de cierre "Lock'n Roll" compuesto por conectores plásticos.



El sistema de dos piezas más fácil de utilizar.

Fácil de cerrar, vaciar y limpiar.

New Image

UN SISTEMA BIEN SELECCIONADO = CALIDAD DE VIDA GARANTIZADA

Sistema de Identificación por Colores

Para ayudarle a seleccionar los componentes de New Image, las etiquetas de las cajas están marcadas con un color-código.

Primero seleccione la barrera cutánea adecuada, después seleccione la bolsa que corresponda con el color-código de la barrera (La etiqueta de la caja color "rojo" de la barrera es compatible con la etiqueta "roja" de la caja de las bolsas).



44mm



57mm



70mm



102mm

Barreras Cutáneas Planas con Aro Flotante



1460x (Recortable)

Caja con 5

- ▶ Barrera Cutánea Plana **FlexTend**
- ▶ Con Marco Adhesivo

Código	Color	Medida del Aro	Recortable Hasta
14602	●	44mm	32mm
14603	●	57mm	44mm
14604	●	70mm	57mm
14606	●	102mm	89mm



1500x (Recortable)

Caja con 5

- ▶ Barrera Cutánea Plana **SoftFlex**

Código	Color	Medida del Aro	Recortable Hasta
15002	●	44mm	32mm
15004	●	70mm	57mm



1560x (Recortable)

Caja con 5

- ▶ Barrera Cutánea Plana **FlexTend**
- ▶ Sin Marco Adhesivo

Código	Color	Medida del Aro	Recortable Hasta
15602	●	44mm	32mm
15603	●	57mm	44mm
15604	●	70mm	57mm

Barreras Cutáneas Convexas con Aro Flotante



1480x (Recortable)

Caja con 5

- ▶ Barrera Cutánea Convexa **Flextend**
- ▶ Con Marco Adhesivo

Código	Color	Medida del Aro	Recortable Hasta
14802	●	44mm	25mm
14803	●	57mm	38mm
14804	●	70mm	51mm



1490x (Pre-Cortada)

Caja con 5

- ▶ Barrera Cutánea Convexa **Flextend**
- ▶ Con Marco Adhesivo

Código	Color	Medida del Aro	Medida del Estoma
14901	●	44mm	16mm
14902	●	44mm	19mm
14903	●	44mm	22mm
14904	●	44mm	25mm
14905	●	57mm	29mm
14906	●	57mm	32mm
14907	●	57mm	35mm
14908	●	57mm	38mm
14909	●	70mm	41mm
14910	●	70mm	44mm
14911	●	70mm	51mm

TIPS

- ▶ Coloque la barrera cutánea en forma de diamante para prevenir el enroscamiento en las orillas.
- ▶ Cada caja de Bolsas de New Image incluye una bolsa de color oscuro para desechar la bolsa previamente usada.



PRODUCTO CONVEXO

Bolsas Drenables



1818x / 1819x

Caja con 10

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Con Filtro Integrado AF300
- ▶ Con Cierre Lock'n Roll
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶ Con Dorso Confort

Transparente=solo el lado del cuerpo

Beige=ambos lados

Transparente	Beige		Medida	Largo
Código	Código	Color	del Aro	de la Bolsa
18192	18182	●	44mm	30cm
18193	18183	●	57mm	30cm
18194	18184	●	70mm	30cm



18006

Caja con 10

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Sin Filtro Integrado
- ▶ Con Cierre Lock'n Roll
- ▶ Películas Anti-Olor
- ▶ Con Dorso Confort en el Lado del Cuerpo
- ▶ Con Presillas para Cinturón

Ultra-Transparente		Medida	Largo
Código	Color	del Aro	de la Bolsa
18006	●	102mm	30cm



1811x / 1813x

Caja con 10

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Sin Filtro Integrado
- ▶ Con Cierre Lock'n Roll
- ▶ Películas Anti-Olor
- ▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶ Con Dorso Confort

Transparente=solo el lado del cuerpo

Beige=ambos lados

Transparente	Beige		Medida	Largo
Código	Código	Color	del Aro	de la Bolsa
18132	18112	●	44mm	30cm
18133	18113	●	57mm	30cm
18134	18114	●	70mm	30cm

**1810x****Caja con 10**

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Sin Filtro Integrado
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Confort en el Lado del Cuerpo
- ▶ Con Presillas para Cinturón

Transparente

Código	Color	Medida del Aro	Largo de la Bolsa
18102	●	44mm	30cm
18103	●	57mm	30cm
18104	●	70mm	30cm

Bolsas Cerradas



1837x

Caja con 30

- ▶ Bolsa Cerrada
- ▶ Con Filtro Integrado AF300
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Confort en Ambos Lados
- ▶ Con Presillas para Cinturón

Beige

Largo

Código	Color	Medida del Aro	de la Bolsa
18372	●	44mm	23cm
18373	●	57mm	23cm
18374	●	70mm	23cm

Bolsas para Urostomía



1842x

Caja con 10

- ▶ Bolsa para Urostomía
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Confort en el Lado del Cuerpo
- ▶ Con Presillas para Cinturón

Ultra-Transparente

Largo

Código	Color	Medida del Aro	de la Bolsa
18422	●	44mm	23cm
18423	●	57mm	23cm



1840x

Caja con 10

- ▶ Bolsa para Urostomía
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Confort en el Lado del Cuerpo
- ▶ Con Presillas para Cinturón

Transparente

Largo

Código	Color	Medida del Aro	de la Bolsa
18402	●	44mm	23cm
18404	●	70mm	23cm

AF300

Filtro

*Lo primero que notará del Nuevo Filtro es que
si funciona*



Lo segundo que descubrirá es su extraordinario diseño basado en la Tecnología de Hollister. El revolucionario Filtro AF300 tiene un área tri-dimensional de 300mm² que incrementa el flujo de aire.

Comodidad y confianza superior.

Beneficios



- ▶ Reduce la acumulación del aire dentro de la bolsa debido al Filtro AF300.
- ▶ Mejor control del olor debido al paso del aire a través del carbón activado patentado; el cual extiende la vida útil del filtro.
- ▶ Los líquidos no pueden entrar o salir del filtro pues está protegido por la Membrana Médica llamada GORE^{MR}.
- ▶ Los cubre Filtros ya no son necesarios, el usuario puede bañarse o nadar y sentirse seguro.

**El Filtro AF300 está disponible en
New Image**

Premier Sistema de Una Pieza



8531 (Recortable)

Caja con 10

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Barrera Cutánea Plana **Flexend**
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Sin Filtro
- ▶ Con Cierre Lock'n Roll
- ▶ Películas Anti-Olor
- ▶ Con Dorso Confort en el Lado del Cuerpo

Ultra-Transparente

Altura

Código	Recortable Hasta	de la Bolsa
8531*	64mm	30cm



8631 (Recortable)

Caja con 10

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Barrera Cutánea Plana **Flexend**
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Sin Filtro Integrado
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Confort en el Lado del Cuerpo
- ▶ Cierre de Pinza

Transparente

Altura

Código	Recortable Hasta	de la Bolsa
8631*	64mm	30cm



851x / 859x (Pre-Cortada)

Caja con 5

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Barrera Cutánea Convexa **Flexend**
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Sin Filtro Integrado
- ▶ Con Cierre de Lock'n Roll
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶ Con Dorso Confort

Transparente=solo el lado del cuerpo

Transparente

Altura

Código	Beige	Pre-Cortada	de la Bolsa
8510*	8590*	19mm	30cm
8511*	8591*	22mm	30cm
8512*	8592*	25mm	30cm
8513*	8593*	29mm	30cm
8514*	8594*	32mm	30cm
8515*	8595*	35mm	30cm

* Próximamente



PRODUCTO CONVEXO



861x (Pre-Cortada)

Caja con 5

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Barrera Cutánea Convexa **Flexend**
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Sin Filtro Integrado
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶ Con Dorso Comfort en el Lado del Cuerpo
- ▶ Cierre de Pinza

Transparente

Código	Pre-Cortada	Altura de la Bolsa
8610*	19mm	30cm
8611*	22mm	30cm
8612*	25mm	30cm
8613*	29mm	30cm
8614*	32mm	30cm
8615*	35mm	30cm
8616*	38mm	30cm
8617*	41mm	30cm
8618*	44mm	30cm
8619*	51mm	30cm



82300 (Recortable)

Caja con 30

- ▶ Bolsa Cerrada
- ▶ Barrera Cutánea Plana **SoftFlex**
- ▶ Sin Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Con Filtro Integrado
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Comfort

Beige=ambos lados

Beige

Código	Recortable Hasta	Altura de la Bolsa
82300*	55mm	23cm

* Próximamente

 **PRODUCTO CONVEXO**

Bolsas para Urostomía



8460 (Recortable)

Caja con 10

- ▶ Bolsa para Urostomía
- ▶ Barrera Cutánea Plana **Flexlend**
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Confort en el Lado del Cuerpo

Transparente

Altura

Código	Recortable Hasta	de la Bolsa
8460*	64mm	23cm



848x (Pre-Cortada)

Caja con 5

- ▶ Bolsa para Urostomía
- ▶ Barrera Cutánea Convexa **Flexlend**
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶ Con Dorso Confort en el Lado del Cuerpo

Transparente

Altura

Código	Pre-Cortada	de la Bolsa
8480*	13mm	23cm
8481*	16mm	23cm
8482*	19mm	23cm
8483*	22mm	23cm
8484*	25mm	23cm
8485*	29mm	23cm
8486*	32mm	23cm
8487*	35mm	23cm
8488*	38mm	23cm
8489*	44mm	23cm

* Próximamente



PRODUCTO CONVEXO



Asesoría para Personas Ostomizadas

En Hollister nos dedicamos a encontrar junto con el personal médico, las mejores alternativas individuales para el cuidado de las ostomías.

- ▶ *Canalización a Centros de Asesoría Hollister.*
- ▶ *Información de Grupos de Personas Ostomizadas.*
- ▶ *Material Educativo.*
- ▶ *Manual de la Persona Ostomizada.*
- ▶ *DVD Colocación de Equipo para Ostomía.*
- ▶ *Información de Producto*

 9171.1894 / (01800) 823.70.07

www.hollister.com/mexico

Pouchkins

Sistema Pediátrico



3795(Recortable)

Caja con 10

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Barrera Cutánea Plana **SoftFlex**
- ▶ Sin Orificio de Inicio
- ▶ Sin Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Con Filtro Integrado AF300
- ▶ Con Cierre Lock'n Roll
- ▶ Película Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Comfort Beige en el lado del Cuerpo

Transparente

Largo

Código	Recortable Hasta	de la Bolsa
3795*	De 0 hasta 51mm	18cm



3796(Recortable)

Caja con 10

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Barrera Cutánea Plana **SoftFlex**
- ▶ Sin Orificio de Inicio
- ▶ Sin Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Sin Filtro Integrado
- ▶ Con Cierre Lock'n Roll
- ▶ Película Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Comfort Beige en el lado del Cuerpo

Transparente

Largo

Código	Recortable Hasta	de la Bolsa
3796*	De 0 hasta 38mm	16cm



3797(Recortable)

Caja con 10

- ▶ Bolsa para Urostomía
- ▶ Barrera Cutánea Plana **SoftFlex**
- ▶ Sin Orificio de Inicio
- ▶ Sin Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Película Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Comfort Beige en el lado del Cuerpo

Transparente

Largo

Código	Recortable Hasta	de la Bolsa
3797*	De 0 hasta 38mm	22cm

TIPS

- ▶ PouchKins: Sistema Pediátrico para Ostomía.
- ▶ PouchKins pueden utilizarse en adultos en condiciones como heridas pequeñas, drenajes y fistulas.

* **Próximamente**



3799 (Recortable)

Caja con 10

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Sin Filtro Integrado
- ▶ Con Cierre Lock'n Roll
- ▶ Película Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶ Con Dorso Comfort Beige en el lado del Cuerpo

Transparente

Código	Color	Medida del Aro	Largo de la Bolsa
3799*	●	44cm	16cm



18292/18282

Caja con 20

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Con Filtro Integrado AF300
- ▶ Con Cierre Lock'n Roll
- ▶ Película Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶ Con Dorso Comfort Beige en el lado del Cuerpo

Transparente

Código	Beige	Color	Medida del Aro	Largo de la Bolsa
18292*	18282	●	44cm	16cm



3761 (Recortable)

Caja con 5

- ▶ Barrera Cutánea Plana **SoftFlex**
- ▶ Sin Orificio de Inicio
- ▶ Sin Marco Adhesivo Microporoso

Transparente

Código	Color	Medida del Aro	Recortable Hasta
3761*	●	44cm	de 0 hasta 32cm



3774

Caja con 1 pieza

- ▶ Cinturón Pediátrico para Ostomía

Código	Medida
3774	25-43cm

* Próximamente

Adapt Accesorios

Accesorios de Barrera Cutánea



795xx

Caja con 10

▶ Adapt Anillos Convexos

Código	Diámetro Interno
79520	20mm (puede ser alargado hasta 25mm)
79530	30mm (puede ser alargado hasta 35mm)
79540	40mm (puede ser alargado hasta 45mm)



780x

Caja con 10

▶ Adapt Anillos Planos

Código	Diámetro Interno
7805*	48mm
7806*	98mm



79400

Caja con 10

▶ Adapt Barrera Cutánea en Tiras

Código	Peso	Largo
79400	60 gramos	13cm

Pasta



79300

Caja con 1

▶ Adapt Pasta

Código	Descripción
79300	Tubo con 57gr

Polvo



7906

Caja con 1

▶ Adapt Polvo para Estomas

Código	Descripción
7906	Frasco Rociador con 30ml

* Próximamente

Pasta Karaya



7910

Caja con 1

- ▶ Pasta de Karaya

Código

7910

Descripción

Tubo 135ml

Polvo Karaya



7905

Caja con 1

- ▶ Polvo de Karaya

Código

7905

Descripción

Frasco Rociador con 75ml

Gel Protector Cutáneo



7917

**Corrugado con 12 cajas
de 50 toallitas cada uno**

- ▶ Gel Protector Cutáneo en Toalla

Código

7917

Removedor de Adhesivo



7760


**Corrugado con 12 cajas
de 50 toallitas cada uno**

- ▶ Removedor Universal en Toallas

Código

7760

Filtros Reemplazables

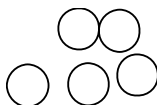

7766

**Caja con 5 bolsas
con 20 filtros c/u**

- ▶ Filtros Reemplazables Hollister
- ▶ 1 Bolsa Contiene 20 Filtros y 2 Tapones

Código

7766

Eliminador de Olores y Lubricante

78500 / 78501

▶ Adapt Lubricante y Desodorante



Código	Descripción	Presentación
78500	Botella con 236ml	Caja con 1 Pieza
78501	Sobres con 8ml	Caja con 50 sobres

Tubo Adaptador para Bolsas de Urostomía

7331

Caja con 10

▶ Tubo Adaptador para Bolsas de Urostomía



Código

7331

Pinzas para Bolsas Drenables

8770

Caja con 20

▶ Pinza para Bolsa Drenable



Código

8770

Color

Beige

Cinturones para Ostomía

7300

Caja con 1

7299

Caja con 1

▶ Cinturón para Ostomía Ajustable



Código

7300

66 - 109cm Mediano

7299

74 - 125cm Grande

Barrera Cutánea



7900

Caja con 5

7901

Caja con 4

▶ Barrera Cutánea Premium

Código

Medida

7900 10 x 10cm

7901 20 x 20cm



8800

Caja con 5

8801

Caja con 3

▶ Barrera Cutánea *Flexend*

Código

Medida

8800 10 x 10cm

8801 20 x 20cm

Cubre Estomas



318x (Pre-Cortada)

Caja con 30

- ▶ Cubre Estomas
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Con Filtro Incluido
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido

Beige


Medida del Estoma


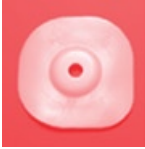

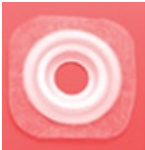
Medida






3184 51mm

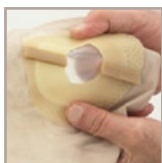



11cm







Adapt Accesorios



Tandem Barreras Convexas con Aro Flotante CPL			Ⓜ	Ⓛ	Ⓧ	Ⓢ
Medida del Aro de Ensamble			38mm	44mm	57mm	70mm
Recortable 	Sin Marco Adhesivo Microporoso		-----	3794 recortable hasta 25mm	3798 recortable hasta 38mm	37911 recortable hasta 51mm
Pre-Cortada 	Con Marco Adhesivo Microporoso		3730 - 13mm 3731 - 16mm 3732 - 19mm	3733 - 22mm 3734 - 25mm	3735 - 29mm 3736 - 32mm 3737 - 35mm 3738 - 38mm	3739 - 41mm 37310 - 44mm 37311 - 51mm

			Ⓜ	Ⓛ	Ⓧ	Ⓢ
Medida del Aro de Ensamble			38mm	44mm	57mm	70mm
Bolsa Cerrada con Filtro Integrado	Beige		3347	3342	3343	3344
Bolsa Drenable Con Filtro Reemplazable	Transparente		3897	3892	3893	3894
	Beige		3837	3832	3833	3834
Bolsa Drenable Sin Filtro	Transparente		3807	3802	3803	3804
	Beige		3817	3812	3813	-----
Bolsa para Urostomía	Transparente		3907	3902	3903	3904

Tandem Barreras Planas con Aro Flotante CPL			Ⓜ	Ⓛ	Ⓧ	Ⓢ
Medida del Aro de Ensamble			38mm	44mm	57mm	70mm
Recortable 	Con Marco Adhesivo Microporoso 	3727 recortable hasta 25mm	3722 recortable hasta 32mm	3723 recortable hasta 44mm	3724 recortable hasta 57mm	
	Sin Marco Adhesivo Microporoso 	3767 recortable hasta 25mm	3762 recortable hasta 32mm	3763 recortable hasta 44mm	3764 recortable hasta 57mm	
Pre-Cortada 	Con Marco Adhesivo Microporoso 	3747 - 19mm 3742 - 25mm	3748 - 32mm	3743 - 38mm 3749 - 44mm	----- -----	

			Ⓜ	Ⓛ	Ⓧ	Ⓢ
Medida del Aro de Ensamble			38mm	44mm	57mm	70mm
Bolsa Cerrada con Filtro Integrado	Beige 	3347	3342	3343	3344	
Bolsa Drenable Con Filtro Reemplazable	Transparente 	3897	3892	3893	3894	
	Beige 	3837	3832	3833	3834	
Bolsa Drenable Sin Filtro	Transparente 	3807	3802	3803	3804	
	Beige 	3817	3812	3813	-----	
Bolsa para Urostomía	Transparente 	3907	3902	3903	3904	

Sistema de Identificación con Letras

Para ayudarle a seleccionar los componentes del Sistema de Dos Piezas Tandem, la etiqueta de cada caja de productos Tandem está identificada con una letra (H, I, J ó K). Una vez que haya elegido la barrera Tandem, seleccione una bolsa o irrigador que corresponda con la letra marcada en la etiqueta de la caja.

Barreras Cutáneas Planas con Aro Flotante



372x (Recortable)

Caja con 5

- ▶ Barrera Cutánea Plana **FlexWear**
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso

Letra

Código	Identificación	Medida del Aro	Recortable Hasta
3727	H	38mm	25mm
3722	I	44mm	32mm
3723	J	57mm	44mm
3724	K	70mm	57mm



374x (Pre-Cortada)

Caja con 5

- ▶ Barrera Cutánea Plana **FlexWear**
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso

Letra

Código	Identificación	Medida del Aro	Medida del Estoma
3747	H	38mm	19mm
3742	H	38mm	25mm
3748	I	44mm	32mm
3743	J	57mm	38mm
3749	J	57mm	44mm



376x (Recortable)

Caja con 5

- ▶ Barrera Cutánea Plana **SoftFlex**
- ▶ Sin Marco Adhesivo Microporoso

Letra

Código	Identificación	Medida del Aro	Recortable Hasta
3767	H	38mm	25mm
3762	I	44mm	32mm
3763	J	57mm	44mm
3764	K	70mm	57mm

Barreras Cutáneas Convexas con Aro Flotante



373x (Pre-Cortada)

Caja con 5

- ▶ Barrera Cutánea Convexa **FlexWear**
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso

Código	Letra		Medida del Estoma
	Identificación	Medida del Aro	
3730	Ⓜ	38mm	13mm
3731	Ⓜ	38mm	16mm
3732	Ⓜ	38mm	19mm
3733	Ⓛ	44mm	22mm
3734	Ⓛ	44mm	25mm
3735	Ⓝ	57mm	29mm
3736	Ⓝ	57mm	32mm
3737	Ⓝ	57mm	35mm
3738	Ⓝ	57mm	38mm
3739	Ⓚ	70mm	41mm
37310	Ⓚ	70mm	44mm
37311	Ⓚ	70mm	51mm



379x (Recortable)


Caja con 5

- ▶ Barrera Cutánea Convexa **FlexWear**
- ▶ Sin Marco Adhesivo Microporoso

Código	Letra		Recortable Hasta
	Identificación	Medida del Aro	
3794	Ⓛ	44mm	25mm
3798	Ⓝ	57mm	38mm
37911	Ⓚ	70mm	51mm



PRODUCTO CONVEXO

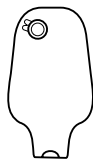

389x / 383x

Caja con 10

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Con Filtro Reemplazable
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Sin Dorso Confort
- ▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶ Incluye una Bolsa con 20 Filtros Reemplazables Hollister y 2 Protectores #7766

Transparente Código	Beige Código	Letra Identificación	Medida del Aro
3897	3837	Ⓜ	38mm
3892	3832	Ⓛ	44mm
3893	3833	Ⓝ	57mm
3894	3834	Ⓚ	70mm




380x / 381x

Caja con 10

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Sin Filtro Integrado
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶ Con Dorso Confort

Transparente Código	Beige Código	Letra Identificación	Medida del Aro
3807	3817	Ⓜ	38mm
3802	3812	Ⓛ	44mm
3803	3813	Ⓝ	57mm
3804	----	Ⓚ	70mm

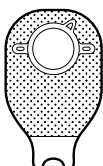


384x

Caja con 10

- ▶ Mini Bolsa Drenable
- ▶ Sin Filtro Integrado
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Confort
- ▶ Con Presillas para Cinturón

Beige Código	Letra Identificación	Medida del Aro
3847	Ⓜ	38mm
3842	Ⓛ	44mm
3843	Ⓝ	57mm
3844	Ⓚ	70mm

Bolsas Cerradas y Bolsas para Urostomía

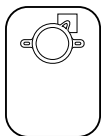

334x

Caja con 30

- ▶ Bolsa Cerrada
- ▶ Con Filtro Integrado
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Confort en Ambos Lados
- ▶ Con Presillas para Cinturón

Beige Código	Letra Identificación	Medida del Aro
3347	Ⓜ	38mm
3342	Ⓛ	44mm
3343	Ⓝ	57mm
3344	Ⓚ	70mm

Bolsas para Urostomía




390x Caja con 10

- ▶ Bolsa para Urostomía
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Confort
- ▶ Con Presillas para Cinturón

Transparente Código	Letra Identificación	Medida del Aro
3907	Ⓜ	38mm
3902	Ⓛ	44mm
3903	Ⓝ	57mm
3904	Ⓚ	70mm

Bolsas de Una Pieza

Bolsas Drenables con Barrera Cutánea Plana

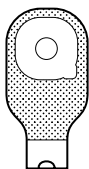

3250 (Recortable)


Caja con 10

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Barrera Cutánea Plana **SoftFlex**
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Dorso Confort

Transparente

Largo

Código	Recortable Hasta	de la Bolsa
3250	64mm	30cm

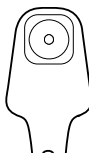

3631 (Recortable)


Caja con 10

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Barrera Cutánea Plana **FlexWear**
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido

Transparente

Largo

Código	Recortable Hasta	de la Bolsa
3631	64mm	30cm

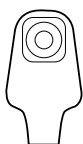

7600 (Recortable)


Caja con 30

- ▶ Bolsa Cerrada / Drenable
- ▶ Con Adhesivo Microporoso

Transparente

Largo

Código	Recortable Hasta	de la Bolsa
7600	51mm	30cm

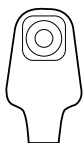

7650 (Recortable)

Caja con 10

- ▶ Bolsa Cerrada / Drenable
- ▶ Barrera Cutánea Plana

Transparente

Largo

Código	Recortable Hasta	de la Bolsa
7650	51mm	30cm

Bolsas Drenables Karaya 5



366x (Pre-Cortada)

Caja con 15

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Barrera Cutánea Karaya 5
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Presillas para Cinturón
- ▶ Incluye 1 Bolsa con 20 Filtros Reemplazables Hollister y 2 Protectores #7766

Transparente

Código	Medida del Estoma	Largo de la Bolsa
3662	16mm	30cm
3668	22mm	30cm
3663	29mm	30cm
3669	35mm	30cm
3664	38mm	30cm

Bolsas Drenables con Barrera Cutánea Convexa



361x (Pre-Cortada)

Caja con 10

- ▶ Bolsa Drenable
- ▶ Barrera Cutánea Convexa **FlexWear**
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Presillas para Cinturón


Transparente

Código	Medida del Estoma	Largo de la Bolsa
3610	19mm	30cm
3612	25mm	30cm
3613	29mm	30cm
3614	32mm	30cm
3615	35mm	30cm
3617	41mm	30cm
3618	44mm	30cm
3619	51mm	30cm



PRODUCTO CONVEXO

Bolsas Cerradas

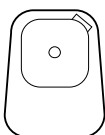

3520 (Recortable)

Caja con 30

- ▶ Bolsa Cerrada
- ▶ Barrera Cutánea Plana **SoftFlex**
- ▶ Sin Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Confort Panel en el Lado del Cuerpo

Transparente

Largo

Código

Recortable Hasta

de la Bolsa

3520

64mm

19cm

Karaya 5



332x (Pre-Cortada)

Caja con 30

- ▶ Bolsa Cerrada
- ▶ Barrera Cutánea Karaya 5
- ▶ Con Filtro Incluido
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Presillas para Cinturón

Código

Medida del Estoma

3322

16mm

3328

22mm

3323

29mm

3329

35mm

3324

38mm


3325

51mm

3326

64mm

Bolsas para Urostomía con Barrera Cutánea Plana

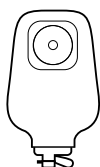

1460 (Recortable)

Caja con 10

- ▶ Bolsa para Urostomía
- ▶ Barrera Cutánea Plana **FlexWear**
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Marco Adhesivo

Transparente

Código

Recortable Hasta

Largo


de la Bolsa

1460

64mm

23cm

Bolsas para Urostomía con Barrera Cutánea Convexa

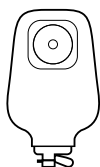

148x (Pre-Cortada)

Caja con 10

- ▶ Bolsa para Urostomía
- ▶ Barrera Cutánea Convexa **FlexWear**
- ▶ Con Marco Adhesivo Microporoso
- ▶ Películas Anti-Olor y Anti-Ruido
- ▶ Con Presillas para Cinturón

Transparente

Código

Medida del Estoma

Largo

de la Bolsa

1480

13mm

23cm

1481

16mm

23cm

1482

19mm

23cm

1483

22mm

23cm

1484

25mm

23cm

1485

29mm

23cm

1486

32mm

23cm

1487

35mm

23cm

1488

38mm


23cm

1489

44mm

23cm

Sistema de Irrigación Completo

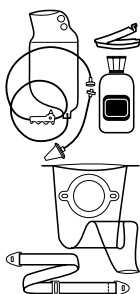

7720

Caja con 1 Equipo


- ▶ Irrigador con Cono
- ▶ 12 Mangas de Irrigación
- ▶ Frasco de Lubricante para Estoma 120ml
- ▶ Cinturón Mediano para Ostomía
- ▶ Pinza

Código

Medida de la Bolsa

7720

51mm

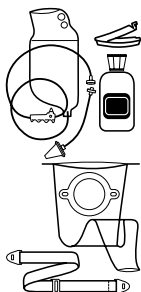

7719

Caja con 1 Equipo

- ▶ Irrigador con Cono
- ▶ 12 Mangas de Irrigación
- ▶ Frasco de Lubricante para Estoma 120ml
- ▶ Cinturón Mediano para Ostomía
- ▶ Pinza

Código

Medida de la Bolsa

7719

76mm



Atención Especializada Vía Telefónica

Creamos un espacio abierto y personal para acercarnos a usted:


- *Localización de Centros de Asesoría Hollister.*
- *Ubicación de Puntos de Venta.*
- *Ayuda para Personas Ostomizadas y sus familiares.*
- *Información de Grupos de Personas Ostomizadas.*
- *Información para Personal Médico.*

☎ 9171.1894 / (01800) 823.70.07

www.hollister.com/mexico

Cuidado de Heridas

Restore Plus Apósito Hidrocoloide: Estéril

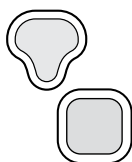


995x

- ▶ Apósito Oclusivo con una Capa Exterior Flexible
- ▶ Mantiene un Ambiente Húmedo en la Herida
- ▶ Maneja Exudado Mínimo a Moderado en Heridas de Espesor Parcial o Total
- ▶ Disponible con o sin Bordes Desvanecidos
- ▶ Formas Especiales para Región Sacrococcígea
- ▶ Incluye una Guía de Medición Desechable

Código	Descripción	Caja con
9953	Sin Bordes Desvanecidos 10 x 10cm	5
9954	Sin Bordes Desvanecidos 15 x 20cm	3
9955	Sin Bordes Desvanecidos 20 x 20cm	3
9956	Con Bordes Desvanecidos 10 x 10cm	5
9957	Con Bordes Desvanecidos 15 x 20cm	3
9958	Con Bordes Desvanecidos 20 x 20cm	3
9959	Con Bordes Desvanecidos 42cm ² Para Región Sacrococcígea	5 Triangular

Restore Extra Delgado Apósito Hidrocoloide: Estéril

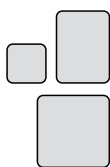


9921 / 9923 / 9925

- ▶ Apósito Oclusivo Delgado con Dorso Flexible
- ▶ Mantiene un Ambiente Húmedo en la Herida
- ▶ Maneja Exudado Mínimo a Moderado en Heridas
- ▶ Protege la Piel de Lesiones por Fricción
- ▶ Incluye una Guía de Medición Desechable

Código	Descripción	Caja con
9921	10 x 10cm	5
9923	15 x 20cm	3
9925	20 x 20cm	3

Restore Cx Apósito Hidrocoloide: Estéril

9931 / 9933 / 9936

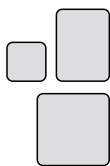


- ▶ Apósito Oclusivo
- ▶ Maneja Exudado Mínimo a Moderado en Heridas de Espesor Parcial
- ▶ Fácil de Modelar en Sitios de Difícil Manejo
- ▶ Incluye una Guía de Medición Desechable

Código	Descripción	Caja con
9931	10 x 10cm	5
9933	15 x 20cm	3
9936	20 x 20cm	3

Restore Apósito Hidrocoloide: Estéril

9930 / 9932 / 9935

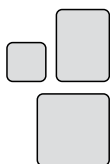


- ▶ Apósito Oclusivo con Dorso de Hule Espuma
- ▶ Ideal para Áreas de Fricción con Exudado Moderado
- ▶ Incluye una Guía de Medición Desechable

Código	Descripción	Caja con
9930	10 x 10cm	5
9932	15 x 20cm	3
9935	20 x 20cm	3

Restore CalciCare Apósito de Alginato de Calcio: Estéril

9937 / 9938 / 9939 / 9940

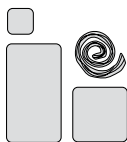

- ▶ Altamente Absorbente
- ▶ Hecho de Alginato de Sodio y Calcio, creando un gel protector que al contacto con el exudado forma una interfase húmeda en la herida
- ▶ Permanece intacto cuando se satura de tal manera que puede ser retirado en una sola pieza

Código	Descripción	Caja con
9937	10 x 10cm	10
9938	5 x 5cm	10
9939	10 x 20cm	5
9940	30cm	5

Restore Hydrogel

9974



- ▶ Mantiene un ambiente húmedo en heridas de espesor parcial y total
- ▶ Gel claro y viscoso
- ▶ Tiempo de uso mayor a 72 hrs

Código	Descripción	Caja con
9974	Gel Amorfo en Tubo de 89ml	12



Atención a Distribuidores

**Contacto único para la atención de
Distribuidores.**

- ▶ *Información sobre Producto*
- ▶ *Seguimiento de Ordenes de Compra*
- ▶ *Solicitud de Cotizaciones*

☎ 9171.1894 / (01800) 823.70.07

www.hollister.com/mexico

Dispositivos de Fijación

Anchor Fast

Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral

De forma innovadora nos hemos asegurado de tener una forma de proteger la piel de su paciente.



 Hollister

¡Atención a los detalles. Atención a la vida!

Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral Anchor Fast



El Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral Anchor Fast es una alternativa fácil de usar en lugar de la cinta adhesiva para asegurar los tubos endotraqueales orales.

Su diseño avanzado libre de látex asegura y facilita el movimiento de los tubos endotraqueales orales y simplifica el acceso para el cuidado oral.

Diseño Avanzado

El diseño avanzado ayuda a minimizar la presión en el labio superior y en el tejido circundante y no ocluirá el tubo.

El adhesivo libre de látex, suave con la piel proporciona un uso prolongado, reduce la denudación potencial de la piel y ayuda a conservarla saludable.



- ▶ La avanzada barrera cutánea se adhiere en presencia de secreciones orales y transpiración.
- ▶ Se adhiere de forma segura eliminando la necesidad de cambiar la tela adhesiva frecuentemente.
- ▶ La banda de cuello acojinada es ajustable y fácil de asegurar.
- ▶ Asegura los tubos endotraqueales orales (5-10mm).

Mayores Ventajas

El Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral Anchor Fast promueve el movimiento estable, sin problemas, de la pinza a lo largo del riel, permitiendo así la fácil reubicación del tubo y prepara el acceso para succionar y realizar el cuidado oral.

- ▶ La pinza móvil puede ser recolocada y asegurada en cualquier punto.
- ▶ Sólo se necesita una persona para la recolocación del tubo.
- ▶ La pinza cierra y sostiene el tubo de forma segura.
- ▶ Ayuda a minimizar la posible formación de úlceras por presión en los labios y tejido mucoso.
- ▶ No deja residuos adhesivos en la piel después de retirarlo.

El Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral Anchor Fast proporciona características avanzadas que se esperan de Hollister. La reubicación suave, estabilidad y protección de la piel incrementan el cuidado que usted proporciona.



Comodo Empaque

- ▶ Conserva la forma
- ▶ Empacado de manera individual
- ▶ Fácil de desechar

Sujetador para Tubo Endotraqueal Oral Anchor Fast

Cantidad
Caja con 12

Código
9799

Anchor Fast Sujetador de Tubo Endotraqueal Oral

9799



- ▶ Simplifica el acceso para el aseo oral
- ▶ Asegura los Tubos Endotraqueales Orales (5-10mm)
- ▶ Adhesivo de Barrera Cutánea **Flexend** que se adhiere en las Mejillas.
- ▶ Pinza de Cierre que Sostiene el Tubo de Forma Segura
- ▶ Banda Ajustable que Mantiene el Dispositivo Asegurado a la Nuca
- ▶ Empaque Individual
- ▶ Libre de Látex

Código	Descripción	Caja con
9799	Anchor Fast Sujetador de Tubo Endotraqueal Oral	12

Sujetador de Tubos de Drenaje (DTAD): Estéril

9780




- ▶ Asegura una Variedad de Drenajes o Tubos (10-24Fr) Verticales a la Piel del Paciente
- ▶ Su Barrera **FlexWear** con Dorso de Hule Espuma se Acomoda a una Variedad de Sitios

Código	Descripción	Caja con
9780	Sujetador de Tubos de Drenaje (DTAD): Estéril	10

Sujetador de Tubo Horizontal (HTAD): Estéril

9781

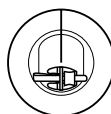


- ▶ Asegura los Drenajes, Tubos o Catéteres (5-40Fr) Paralelos a la Piel del Paciente
- ▶ Los Tubos Pueden ser Asegurados en el Punto de Salida o en un Punto Distal
- ▶ El Adhesivo de la Barrera **FlexWear** Asegura el Dispositivo a la Piel
- ▶ Previene la Migración del Tubo y Protege la Piel Circundante al Punto de Salida

Código	Descripción	Caja con
9781	Sujetador de Tubo Horizontal (HTAD): Estéril	5

Sujetador de Tubo de Succión (STAD)

9785

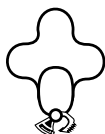

- ▶ Asegura los Tubos de Succión Nasogástricos (12-18Fr)
- ▶ Forma de Mariposa con Barrera **FlexWear** que se Amolda a la Nariz del Paciente
- ▶ Mayor Comodidad
- ▶ Su Pinza Única de Péndulo Elimina la Presión en las Narinas

Código	Descripción	Caja con
9785	Sujetador de Tubos de Succión (STAD): Estéril	20

Sujetador de Tubos de Alimentación (FTAD)

9786



- ▶ Asegura los Tubos Nasogástricos/ Nasointestinales para Alimentación o Tubos de Succión (5-18Fr)
- ▶ Forma de Mariposa con Barrera **FlexWear** que se Amolda a la Nariz del Paciente
- ▶ Mayor Comodidad
- ▶ Su Pinza Única de Péndulo Elimina la Presión en las Narinas

Código	Descripción	Caja con
9786	Sujetador de Tubos de Alimentación (FTAD): Estéril	20

Incontinencia

InView Catéteres Externos Masculinos Autoadheribles



975xx

Caja con 30

- ▶ Sin Látex
- ▶ Auto Adhesivo
- ▶ Contiene la cantidad de adhesivo para uso diario
- ▶ Perfecto para pacientes con sensibilidad al látex

Código

97525	Standard	Chico 25mm
97529	Standard	Mediano 29mm
97532	Standard	Intermedio 32mm
97536	Standard	Largo 36mm
97541	Standard	Extra Largo 41mm

Accesorios Bolsas para Pierna



9345


Caja con 10

- ▶ Tubo Extensor de 46cm con Conector

Código

9345

Bolsa para Pierna Recolectora de Orina

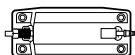

9814 / 9805

Caja con 10

Código

Descripción

9814	540ml
9805	900ml

Sujetador sin Látex para Bolsa de Pierna



9343

Caja con 3 pares

- ▶ Par de Sujetadores Elásticos para Bolsa de Pierna sin Látex

Código

Descripción

9343	58cm
------	------

Bolsa Nocturna para Recolección de Orina con Válvula Anti-Reflujo

9839

Caja con 20



- ▶ Sin látex
- ▶ Capacidad 2,000ml
- ▶ Válvula Anti-Reflujo
- ▶ Puerto para Muestras
- ▶ Paso de Fluidos Estéril

Código

Descripción

9839

2,000ml

TIPS


Las bolsas para pierna de Hollister le ofrecen muchos beneficios:

- ▶ Material suave y cómodo de vinil
- ▶ Plisados que le dan mayor discreción
- ▶ Variedad
- ▶ Válvula de drenaje fácil de manejar que requiere de mínima destreza
- ▶ Amplios sujetadores para pierna de tela que evitan que la bolsa se mueva
- ▶ Los botones protectores de las bolsas disminuyen significativamente el riesgo de puntos de presión
- ▶ La válvula anti-reflujo previene que la orina regrese

Colectores Fecales

9822 / 9821

Caja con 10

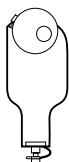

- ▶ Barrera Cutánea **SoftFlex** Recortable
- ▶ Película Anti-Olor
- ▶ Puerto para Termómetro
- ▶ Drenable

Código	Descripción	Largo de la Bolsa
9822	500ml	25cm
9821	1,000ml	30cm

TIPS

- ▶ Los colectores fecales deben ser utilizados en la primera evidencia de diarrea e incontinencia fecal; antes de que la piel peri-anal esté dañada
- ▶ Los colectores fecales brindan beneficios a los pacientes que están inmóviles, recibiendo antibióticos con tubos de alimentación, tienen clostridium o tienen sangrados gastro-intestinales

Riesgos asociados con los tubos rectales

- ▶ Potencial de daño al esfínter
- ▶ Potencial de perforación o necrosis
- ▶ Contraindicado para pacientes con sangrados o patologías rectales
- ▶ Indicado únicamente para uso de corto tiempo
- ▶ Puede causar filtraciones provocando irritación en la piel, olor e incremento del tiempo de cuidados



Asesoría Especializada

¡Viva con plenitud!

Descubra todo lo extraordinario que tiene la vida para usted.

Juntos encontraremos la mejor alternativa de acuerdo a sus necesidades.

 9171.1894 / (01800) 823.70.07

www.hollister.com/mexico

Códigos

Códigos

Código	Página	Código	Página	Código	Página
1460	43	3733	35	3907	37
1480	43	3734	35	7299	30
1481	43	3735	35	7300	30
1482	43	3736	35	7331	30
1483	43	3737	35	7600	40
1484	43	3738	35	7650	40
1485	43	3739	35	7719	46
1486	43	3742	34	7720	46
1487	43	3743	34	7760	29
1488	43	3747	34	7766	29
1489	43	3748	34	7805	28
3184	31	3749	34	7806	28
3250	40	3761	25	7900	31
3322	42	3762	34	7901	31
3323	42	3763	34	7905	29
3324	42	3764	34	7906	28
3325	42	3767	34	7910	29
3326	42	3774	25	7917	29
3328	42	3794	35	8460	20
3329	42	3795	24	8480	20
3342	37	3796	24	8481	20
3343	37	3797	24	8482	20
3344	37	3798	35	8483	20
3347	37	3799	25	8484	20
3520	42	3802	36	8485	20
3610	41	3803	36	8486	20
3612	41	3804	36	8487	20
3613	41	3807	36	8488	20
3614	41	3812	36	8489	20
3615	41	3813	36	8510	18
3617	41	3817	36	8511	18
3618	41	3832	36	8512	18
3619	41	3833	36	8513	18
3631	40	3834	36	8514	18
3662	41	3837	36	8515	18
3663	41	3842	36	8531	18
3664	41	3843	36	8590	18
3668	41	3844	36	8591	18
3669	41	3847	36	8592	18
3722	34	3892	36	8593	18
3723	34	3893	36	8594	18
3724	34	3894	36	8595	18
3727	34	3897	36	8610	19
3730	35	3902	37	8611	19
3731	35	3903	37	8612	19
3732	35	3904	37	8613	19

Código	Página	Código	Página	Código	Página
8614	19	14606	10	37311	35
8615	19	14802	11	37911	35
8616	19	14803	11	78500	30
8617	19	14804	11	78501	30
8618	19	14901	11	79300	28
8619	19	14902	11	79400	28
8631	18	14903	11	79520	28
8770	30	14904	11	79530	28
8800	31	14905	11	79540	28
8801	31	14906	11	82300	19
9343	62	14907	11	97525	60
9345	62	14908	11	97529	60
9780	58	14909	11	97532	60
9781	58	14910	11	97536	60
9785	59	14911	11	97541	60
9786	59	15002	10		
9799	58	15004	10		
9805	62	15602	10		
9814	62	15603	10		
9821	64	15604	10		
9822	64	18006	12		
9839	63	18102	13		
9921	50	18103	13		
9923	50	18104	13		
9925	50	18112	12		
9930	51	18113	12		
9931	51	18114	12		
9932	51	18132	12		
9933	51	18133	12		
9935	51	18134	12		
9936	51	18182	12		
9937	51	18183	12		
9938	51	18184	12		
9939	51	18192	12		
9940	51	18193	12		
9953	50	18194	12		
9954	50	18282	25		
9955	50	18292	25		
9956	50	18372	14		
9957	50	18373	14		
9958	50	18374	14		
9959	50	18402	14		
9974	52	18404	14		
14602	10	18422	14		
14603	10	18423	14		
14604	10	37310	35		

Aro: Aro plástico en las bolsas de dos piezas del sistema para ostomía que se usa para ensamblar las dos partes.

Aro Flotante: Permite que los dedos sean introducidos debajo del aro evitando presionar sobre el abdomen mientras se ensamblan la bolsa y la barrera.

Barrera Cutánea Convexa: Puede ser aplicada cuando el estoma está hundido o retraído. La forma de la barrera ayuda a presionar con mayor profundidad alrededor del estoma para protuirlo.

Barrera Cutánea Flexextend: Flexextend es una barrera cutánea de Uso Extendido, barrera cutánea sintética, la cual está diseñada para ser más resistente a las descargas.

Barrera Cutánea FlexWear: FlexWear es una barrera cutánea de uso estándar, la cual está diseñada para ser utilizada por más de un día. La barrera FlexWear es más resistente al desgaste que una barrera cutánea SoftFlex.

Barrera Cutánea Plana: Puede ser utilizada cuando el estoma se protuye del abdomen.

Barrera Pre-Cortada: Barrera cutánea previamente cortada a la medida del estoma si éste es redondo.

Barrera Cutánea Recortable: Si el estoma no es redondo, mida en la parte más larga. Seleccione una barrera que pueda ser cortada a la medida y forma correcta.

Barrera Cutánea SoftFlex: Barrera cutánea sintética SoftFlex, la cual se adhiere gentilmente a la piel. Está diseñada para disminuir el daño cutáneo en cambios frecuentes o diarios.

Barrera Cutánea de Uso Estándar: Tiene un adhesivo suave para la piel. Este tipo de barrera cutánea absorbe menos y se desintegra más rápido que las barreras de uso Extendido.

Ejemplos de estas barreras incluyen FlexWear y SoftFlex.

Barrera Cutánea de Uso Extendido: Son barreras cutáneas con elementos especiales que tienen un sello adhesivo más fuerte y que son más resistentes a las descomposturas. Este tipo de barrera puede utilizarse preferentemente en urostomías e ileostomías.

Un ejemplo es la barrera Flexextend. No se recomienda utilizar ningún tipo de preparaciones debajo de las barreras de uso extendido.

Barrera Cutánea de Karaya: La Karaya es una barrera natural utilizada para piel sensible o en los casos que se presente sensibilidad a los productos sintéticos.

Bolsa Cerrada: Bolsa no drenable. Para ser vaciada debe retirarse completamente. Es rápida y fácil de desechar.

Bolsa Drenable: Bolsa con una apertura para su vaciado. Puede tener un cierre integrado o bien utilizar una pinza para mantener la bolsa cerrada hasta que sea el momento de vaciarla.

Bolsa para Urostomía: Bolsa con una válvula de drenaje que permite que la orina pueda ser vaciada de manera rápida y fácilmente.

Colostomía: Creada mediante una operación quirúrgica en el colon, que es parte del intestino largo.

Cierre Lock'n Roll: Sistema de cierre patentado para las bolsas drenables. Mediante plásticos que se entrelazan firmemente creando un cierre seguro. Se encuentra en las Bolsas drenables New Image, Premier y Pouchkins.

Dorso Confort: Tela no tejida que cubre el plástico de la bolsa para brindar mayor comodidad y discreción. Las cubiertas pueden estar en uno o en ambos lados de la bolsa.

Estoma: Abertura quirúrgica por dónde se expulsan los desechos del organismo cuando se tiene una ostomía. El estoma es rojo y húmedo y no tiene sensibilidad.

Filtro: Permite la salida del gas pero no del olor de la bolsa.

Filtro AF300: Filtro de carbón activado con 300mm² de superficie para el paso de aire desodorizándolo. Permite el contacto con líquidos sin afectar su desempeño.

Ileostomía: Creada mediante una operación quirúrgica en el intestino delgado.

Irrigación: Procedimiento utilizado para controlar los tiempos de eliminación de una colostomía. No todas las personas pueden utilizarlo y se requiere de un equipo especial y de entrenamiento.

Película Anti-Olor: Las películas Anti-Olor son altamente resistentes al paso de los olores que salen de la bolsa.

La calidad de la Película Anti-Olor ayuda a incrementar su seguridad.

Tiempo de Uso: El tiempo de uso es el periodo por el cual un producto puede ser utilizado conservando sus propiedades.

El tiempo de uso varía ampliamente dependiendo de una variedad de factores.

Urostomía: Una ostomía creada mediante una operación quirúrgica para drenar la orina.

Centros de Venta y Centros de Asesoría

Entrega a domicilio en toda la República

FARMATEL

Av. Felix Cuevas No. 301, Local 6 y 8, (Entrada por San Francisco),
Col. del Valle, Tels. (0155) 56 29 21 41, (01 800)715 23 33

DISTRITO FEDERAL Y ÁREA METROPOLITANA

Comercializadora Medica Argo

Linares No.26, Col. Roma, Tels. (0155) 3547 5333, 3547 2990

Farmacias Especializadas

•Sucursal Satélite

Manuel Izaguirre No. 25, Cd. Satélite, Naucalpan Edo. de México.
Tels. (0155) 5393 9994, 5393 9957

•Sucursal Lindavista

Cali No.725, Col. Lindavista, Tels. (0155) 5748 1788, 5781 0182
5750 2622

•Sucursal Dr. Pasteur

Dr. Pasteur No. 97, Col. Doctores, Tels. (0155) 5588 4682, 5588 4621

•Sucursal Tlacotalpan

Tlacotalpan No.48, Col. Roma Sur, Tels. (0155) 5574 2059, 5574 6254

•Sucursal Prado Norte

Prado Norte No. 380, Col. Lomas de Chapultepec.
Tels. (0155) 5202 5957, 5202 9054

•Sucursal División del Norte

División del Norte No. 2869, Col. Parque de San Andrés.
Tels. (0155) 5536 2251, 5336 2282, 5336 2283

•Sucursal Tlalpan 1

Calz. de Tlalpan No. 4673, Col. Toriello Guerra.
Tels. (0155) 5665 3200, 5665 5123, 5665 5950

•Sucursal Xochimilco

Av. Prol. División del Norte No. 5091, Col. San Lorenzo la Cebada.
Tels. (0155) 5675 9131, 5334 9373, 5675 9344

•Sucursal Roma Norte

Querétaro No.137, Col. Roma, Tels. (0155) 5564 3447, 5564 2855

•Sucursal Fuentes de Satélite

Fuentes de Satélite No. 25, Fracc. Lomas de Bellavista.
Tels. (0155) 5572 3112, 5572 8506, 5572 8735

Farmacias Paris

República del Salvador No. 97, Col. Centro, Esq. 5 de Febrero.
República del Salvador No. 81, Col. Centro.
Tels. (0155) 5709 5349

Lanceta HG

•Sucursal Hospital General

Dr. Villada No. 81, Col Doctores (a unos pasos del Hosp. Gral)
Tels. (0155) 5578 1958 al 60

•Sucursal La Raza

Calz. Vallejo No. 275, Col. Héroes de Nacozari Contra-esquina
del Centro Médico La Raza. Plaza la Raza.
Tels. (0155) 5556 3542, 5556 3908

•**Sucursal Tlalpan-San Fernando**

Calz. de Tlalpan No. 4923, Col. La Joya, Tel. (0155) 1671 2621 al 23

Medica Motolinía

Motolinía No. 6, Col. Centro, Tels. (0155) 5521 2283, 5512 0484

Medical Recovery

Coahuila No. 41, Col. Roma, Esq. con Cordova

Tels. (0155)1055 7296,1055 7297

Aparatos e Instrumentos Científicos

Motolinía No 5, Col. Centro, Tels. (0155) 5521 7293, 5510 0969

GOM

Motolinía No. 4, Planta Baja, Col. Centro, Tel. (0155) 5512 9733

Medical Center

Motolinía No. 9, Col. Centro, Tels. (0155) 5521 1446 Ext.241

Plenia Supermercado de Salud

•**Sucursal Coapa**

Av. Canal de Miramontes No. 3155, Del. Tlalpan, Tel. (0155) 5599 2170

•**Sucursal Santa Fé**

Av. Juan Salvador Agraz, No. 40, P.B., Col. Santa Fé, Del. Cuajimalpa.

Tel. (0155) 1105 5532

Estima

Mérida No.164-201, Col. Roma, Del. Cuauhtémoc.

Tels. (0155) 5574 7169

Rehabilita

Calz. México Xochimilco, No. 4850, Local 8, Frente a la estación Xomali, del Tren Ligero, entre Viaducto, Tlalpan y Periférico.

Tel. (0155) 5673 2169

ACAPULCO, GUERRERO

ATM. Alta Tecnología Médica

Av. Cuauhtémoc No. 335, Local B, Col. La Garitas, Tels. (01744) 487 5749, 487 5706

AGUASCALIENTES, AGS.

Central Médica Quirúrgica

•**Sucursal Universidad**

Av. Universidad No. 108, Fracc. San Cayetano, Tel. (01449) 153 0116

Lanceta HG

San Miguel el alto No. 620, Col. Fátima, Aguascalientes, Ags.

Tels. (01449) 993 8270 al 72

COLIMA, COLIMA

Provedora Hospitalaria de Colima

Emilio Carranza No 563, Col. Centro, Tel. (01312) 313 9850, 313 9895

CUERNAVACA, MORELOS

Provedora de Hospitales

Av. Morelos Sur No.1602, Local 11-A, Col. Las Palmas.

Tel. (01777) 314 0942

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Moper Medical

República de Uruguay No. 522, Col. Panamericana.

Tels. (01614) 413 2514, 413 0699

DURANGO, DURANGO

Distribuidora Médico Quirúrgica

Felipe Pescador No. 977, Pte., Col. Centro Tel. (01618) 811 8249

GUADALAJARA, JALISCO

Farmacia Carrey

Humboldt No. 650, Col. Centro, Frente al Hospital Civil, Fray Antonio

Alcalde, Tels. (0133) 3613 6337, 3658 4344

Ostomi - Care

Salvador de Quevedo y Zubieta No. 656, Frente a Centro Médico,

Col. La Perla. Tels. (0133) 3618 4868, 3618 4856

Proveedor Médico Científico de Occidente

Av. Federalismo Nte. No. 10, Zona Centro.

Tels./Fax. (0133) 3614 7626, 3614 6307

Industrial Hospitalaria

Av. Federalismo Norte No. 433-A, Col. Centro, Tel. (0133) 3585 8335

LEÓN, GUANAJUATO

Promédica el Bajío

Herdo de Tejada No. 224, Col. Centro, Tels. (01477) 714 0866, 713 6288

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

Comercializadora Cris - Lab

Melchor Ocampo No. 1520, Col. Guerrero.

Tels. (01612) 123 1884, 123 0535

MATAMOROS, TAMAULIPAS

Suministros Médicos Quirúrgicos

Roberto F. García No.88, Col. Modelo, Tel. (01868) 812 5233

MÉRIDA, YUCATÁN

Ortomedic

•Sucursal IMSS

Calle 41 No. 434-D entre 30 y 32, Col. Industrial.

Tel. (01999) 922 4703

Santiago Castillo González

Calle 65B entre 124 y 128, No. 221, Fracc. Yucaltepén, Mérida.

Tels. (01999) 945 2856, 910 9946

METEPEC, EDO. DE MÉXICO

Comercializadora Uribe

Heriberto Enrique No. 250 Local -B., Col. Azteca.

Tel. (01722) 384 3514

MORELIA, MICHOACÁN

Colostomich

Diego José Abad No. 193, Int.19, Col. Centro, Tel. (01443) 317 2092

Material de Curación y Equipo Médico

Zamora No. 104, Col. Molinos de Parras.

Tels. (01443) 313 5564, 317 5155

MONCLOVA, COAHUILA

Centro de Asesoría Especializada en Colostomía y Cuidados de Heridas

V. Carranza 136 L-10, Col. Centro, Monclova Coahuila.

Tel. (01844) 632 4593

MONTERREY, NUEVO LEÓN

Centro de Asesoría Especializada en Colostomía
y Cuidados de Heridas

Av. Pio X por Esquina Miguel Nieto, No. 436.

Tels. (0181) 8344 2110, 8344 2132, 8344 2190

CDIPHSA

Nicaragua No. 338. Col. Vista hermosa, Tel. (0181) 8347 0325

Médica Victoria

Av. Madero No. 3516 Poniente, Col. Mitras Sur.

Tel. (0181) 8347 5503

OAXACA, OAXACA

Ortomedic

•Sucursal Abastos

Módulo A local 21, Central de Abastos, Tel. (01951) 516 9620

•Sucursal Periférico

Periférico No. 116. Col. Centro, Tels. (01951) 514 3656

PACHUCA, HIDALGO

Proveedores de Hospitales

Av. Madero No. 510, Col. Doctores, Tel. (01771) 713 2477

PUEBLA, PUEBLA

Casa RACSS

13 Sur No. 1304. Col. Santiago, Tel. (01222) 243 7320, 240 2868

Morgan "Soluciones a Personas con Colostomía, Heridas e Incontinencia Urinaria"

25 Norte No. 5005. Col. José Cleotilde Torres.

Tels. (01222) 888 8861, 201 1903

QUERÉTARO, QUERÉTARO

Distribuidora Goba

Pinal de Amoles No. 201, Col. Estrella.

Tel. (01442) 212 1970, (01800) 800 4622

SALTILLO, COAHUILA

Centro de Asesoría Especializada en Colostomía
y Cuidados de Heridas

Fco. I. Madero No. 1236. Consultorio 6

(Frente al Hospital General). Col. Centro.

Tel. (01844) 410 9117

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P

De Todo para el Diabético

Av. Venustiano Carranza, No. 2325. Local 24, Plaza Carranza,
Col. Polanco, (por Himno Nacional).

Tel. (01444) 841 6772

Equipos Quirúrgicos Potosinos

Calle 8, No. 140. Col. Industrial Aviación.

Tels. (01444) 817 1490, 817 2586, 817 2504 Ext. 109 y 111

TAMPICO, TAMAULIPAS

Comercial Alpro

Calle Nueva No. 105-Altos., Col. Aurora.

Tels. (01833) 213 9498, 213 9615

Demhsa Proveedores

Justo Sierra No. 106. Sur, Col. Ricardo Flores Magón.

Tels.(01833) 210 2418, 210 7583, 216 6886, (01800) 717 8555

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE

Distrimeth

Juan Cordero No. 10040, Zona Río, Tels. (01664) 684 7066, 684 8113

TOLUCA EDO. DE MÉXICO

Servicios Médicos Especiales de Jesús

Gómez Farías Poniente No. 513, Esq. Nicolás Bravo, Col. Centro.

Tels. (01722) 213 4664, 215 0189

Proveedora de Hospitales del Valle de Toluca

Av. Morelos Pte. 1405 Col. San Bernardino.

Tels. (01722) 215 0321, 214 7219

TORREÓN, COAHUILA

Delta Biomédica

Av. Hidalgo No. 865 Ote. Torreón Coahuila.

Tels. (01871) 713 3879, 192 8729

VERACRUZ, VERACRUZ

El Salvador

AV. 20 de Noviembre No. 941, Casi Esq. Con Iturbide. Col. Centro.

Tels. (01229) 932 9455, Fax. 932 1899

VILLAHERMOSA, TABASCO

Dra. E.T. Samantha Arévalo Madrid

Torre Acir, Canal de Pigüa, No. 102-A, Planta Baja. Col. 1ro de Mayo.

Tel. (01993) 352 6106

Equipos Médicos de Tabasco

Av. 27 de Febrero No. 1024, Col. Centro.

Tels. (01993) 314 0058, 312 5441, 312 2713

DISTRITO FEDERAL Y ÁREA METROPOLITANA

Comercializadora Medica Argo

Linares No.126, Col. Roma.

Tels. (0155) 3547 5333, 3547 2990

Medical Recovery

Av. Robles Domínguez No. 70-A, Col Vallejo.

Tels. (0155) 1055 7296, 1055 7297

Estima

Mérida No. 164, Altos 201, Col. Roma, Tel. (0155) 5574 7169

COLIMA, COLIMA

Asociación de Ostomizados de Colima IAP

Fresno No. 452, Col. Pimentel Llerenas, Tels. (01312) 312 8532

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Moper Medical

República de Uruguay No. 522, Col. Panamericana.

Tels. (01614) 413 2514, 413 0699

GUADALAJARA, JALISCO

Ostomi Care

Salvador de Quevedo y Zubieta, Col. La Perla.

Tels. (0133) 3618 4868, 3618 4856

San Vite

Rubén Darío No. 812, Col. Providencia.

Tels. (0133) 1377 4646

MÉRIDA, YUCATÁN

Santiago Castillo González,

Calle 65B entre 124 y 128, No. 221, Fracc. Yucaltepén, Mérida.

Tels. (01999) 945 2856, 910 9946

METEPEC, EDO. DE MÉXICO

Comercializadora Uribe,

Heriberto Enrique No. 250 Local -B, Col. Azteca.

Tel. (01722) 384 3514

MORELIA, MICHOACAN

Colostomich

Diego José Abad No. 193 Int. 19, Col. Centro.

Tel. (01443) 317 2092

MONTERREY, NUEVO LEÓN

Asociación de Apoyo Integral a Pacientes Ostomizados

Av. Pio X entre Esq. Miguel Nieto, No. 436, Piso 2,

Tels. (0181) 8344 2133

PUEBLA, PUEBLA

Morgan "Soluciones a Personas con Colostomía, Heridas e Incontinencia Urinaria"

25 Norte No. 5005, Col. José Cleotilde Torres.

Tels. (01222) 888 8861, 201 1903

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE

Dinámica Médica Hospitalaria

Av. Jalisco No. 210-B, Col. Cacho, Tel. (01993) 352 6106

VILLAHERMOSA, TABASCO

Dra. E.T. Samantha Arévalo Madrid

Torre Acir, Canal de Pigua, No. 102-A, Planta Baja. Col. 1ro de Mayo

Tels. (01993) 352 6106

VERACRUZ, VERACRUZ

El Salvador

Av. 20 de Noviembre No. 941, Casi Esq. con Iturbide. Col. Centro.

Tels. (01229) 932 9455. Fax. 932 1899

ADAPT

Lubricante y Desodorante



Adapt Lubricante y Desodorante puede ser utilizado en cualquier bolsa drenable o cerrada.



Beneficios:

- ▶ Destruye los olores.
- ▶ Facilita el vaciado de la bolsa.
- ▶ Ayuda a prevenir que la bolsa se pegue
- ▶ No es un perfume, ni enmascara los olores.



Presentaciones:

Código	Presentación	Caja Con:
78500	Botella con 236ml	1 Botella
78501	Sobres con 8ml	50 Sobres





Hollister

Atención a Usuarios Hollister

D.F. y Área Metropolitana **9171 1894**
Interior de la República **(01 800) 823 7007**

www.hollister.com
hollister.mexico@hollister.com

Hollister S.A. de C.V.
Alfonso Nápoles Gándara No. 50, 4o Piso, Col. Peña Blanca Santa Fe, C.P. 01210

Hollister y logo, Hollister, Adapt, AF300, AnchorFast, CenterPointLock, Flexextend, FlexWear, InView, Karaya 5, Lock 'n Roll, New Image, Pouchkins, Premier, Restore, Restore CalciCare, Restore Plus, y "Atención a los detalles. Atención a la vida" son marcas registradas de Hollister Incorporated.

Gore es una marca registrada de W.L. Gore and Associates, Inc.

©2010 Hollister Incorporated.